

Título: Montagem de sala para Atendimento Pré Hospitalar (APH) com Suporte Básico de Vida (SBV)

Código:

1ª versão:
01/08/2023

Atualização:
Versão nº: 01

POP nº: 01

Página 1 de 3

Aprovador da unidade: Maria do Carmo Barros de Melo

Responsável Técnico: Cecília de Oliveira Carvalho Faria e Arcanja Dalva Caldeira Santana

Histórico de revisão:

Quem: Auxiliar de Enfermagem ou Enfermeiro

Objetivo(s):

Proporcionar ambiente organizado e limpo

Proporcionar o bom andamento das aulas

Descrição do Procedimento:

INÍCIO

1. Verificar quantas salas foram solicitadas na agenda. Abaixo segue material necessário para 1 sala SBV adulto e 1 sala SBV pediátrico/ neonatal.

Materiais necessários:

Sala SBV adulto

03 torsos adulto para compressão cardíaca para cada sala (repetir essa mesma quantidade se houver outra sala de adulto)

03 tapetes

03 unidades ventilatórias para adulto

03 máscaras de adulto

01 máscara Pocket

01 caixa de máscara face shield

01 desfibrilador externo automático (DEA) com pilhas funcionantes

Sala SBV pediátrico/ neo

02 torsos infantil e 01 bebê para compressão cardíaca para cada sala (repetir essa mesma quantidade se houver outra sala pediátrica/ neo)

03 tapetes

Título: Montagem de sala para Atendimento Pré Hospitalar (APH) com Suporte Básico de Vida (SBV)		Código:
1ª versão: 01/08/2023	Atualização: Versão nº: 01	POP nº: 01 Página 2 de 3
Aprovador da unidade: Maria do Carmo Barros de Melo		Responsável Técnico: Cecília de Oliveira Carvalho Faria e Arcanja Dalva Caldeira Santana

02 unidades ventilatórias pediátricas

01 unidade ventilatória neonatal

01 máscara Pocket

01 caixa de máscara face shield

01 desfibrilador externo automático (DEA) com pilhas funcionantes

Descrição do procedimento:

2. Higienizar as mãos.
3. Higienizar o material antes da montagem da sala se necessário.
4. Colocar todo material no carrinho de transporte.
5. Distribuir os tapetes e torsos de maneira paralela.
6. Colocar as pilhas no DEA e verificar se estão funcionando. Colocar no mínimo um em cada sala.
7. Colocar as unidades ventilatórias e máscaras junto de cada torso conforme tamanho.
8. Colocar a máscara pocket em uma mesa auxiliar.
9. Ao término da aula, recolher o material, higienizar se necessário e coloca-los no almoxarifado.

FIM

Em caso de não conformidade: Comunicar ao enfermeiro do turno quando o procedimento não for realizado para nova programação.

Referências:

Brasil. Decreto n.94.406/87. Regulamenta a lei n. 7498/86, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências. Brasília; 1987. Disponível em: <http://www.portalconfen.com.br>.

Título: Montagem de sala para Atendimento Pré Hospitalar (APH)
com Suporte Básico de Vida (SBV)

Código:

1ª versão:
01/08/2023

Atualização:
Versão nº: 01

POP nº: 01

Página 3 **de** 3

Aprovador da unidade: Maria do Carmo Barros de Melo

Responsável Técnico: Cecília de Oliveira Carvalho Faria e Arcanja Dalva Caldeira Santana

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Lei n. 7.498**, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Disponível em: <http://www.portalcofen.com.br>. Acessado em: 23/07/2019.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN 564/2017 Código de ética dos profissionais de enfermagem. Disponível em: http://www.confen.gov.br/resolucao-confen-no-5642017_59145.html.