

Título: Montagem de sala para Aula de Caso Clínico Pediátrico (Sim NewB)

Código:

1ª versão:
01/08/2023

Atualização:
Versão nº: 01

POP nº: 03

Página 1 de 3

Aprovador da unidade: Maria do Carmo Barros de Melo

Responsável Técnico: Cecília de Oliveira Carvalho Faria e Arcanja Dalva Caldeira Santana

Histórico de revisão:

Quem: Auxiliar de Enfermagem ou Enfermeiro

Objetivo(s) :

Proporcionar ambiente organizado e limpo

Proporcionar o bom andamento das aulas

Descrição do Procedimento:

INÍCIO

Materiais necessários:

- 01 almofolia de álcool em gel
- 01 almofolia de álcool 70%
- 01 Frasco com Algodão
- 01 cateter pediátrico para punção de Acesso Venoso Central
- 01 Agulha de Punção Intra- óssea
- 01 agulha 25 x 8
- 01 agulha 25 x 7
- 01 agulha 25 x 6
- 01 cabeça de intubação neonatal
- 01 cateter nasal
- 10 unidades de compressa não estéril
- 20 unidades de gaze não estéril
- 01 Esparadrapo ou Micropore
- 02 Frascos SF 0,9% 250 ml

Título: Montagem de sala para Aula de Caso Clínico Pediátrico (Sim NewB)

Código:

1ª versão:
01/08/2023

Atualização:
Versão nº: 01

POP nº: 03

Página 2 **de** 3

Aprovador da unidade: Maria do Carmo Barros de Melo

Responsável Técnico: Cecília de Oliveira Carvalho Faria e Arcanja Dalva Caldeira Santana

01 Hood

01 cateter venoso curto (jelco ®) tamanho 24

01 cateter venoso curto (jelco ®) tamanho 22

01 cateter venoso curto (jelco ®) tamanho 20

01 Cateter vesical

02 Compressas

02 Conectores (para O2 e aspiração)

01 Folha de medicamento de urgência HC/UFMG

01 HOOD

01 Glicosímetro

01 Laringoscópio com 01 lâmina 1 curva e 1 reta

01 Caixa de Luva de Procedimento

02 Sondas de aspiração

01 Par luva estéril tamanho 7,0

01 Par luva estéril tamanho 8,0

01 Manequim SimNewB (já fica na sala)

01 Máscara com reservatório e válvula não reinalante

01 Máscara Laríngea tamanho 1

Frascos de medicamentos (dipirona, beta 2, epinefrina, norepinefrina, milrinona, dopamina, dobutamina, corticoide, brometo de ipatrópio, antibiótico)

01 Perna de Punção intraóssea

01 Saturímetro

02 Seringas de 05 e 10 ml

02 Seringas de 20 ml

01 Termômetro

01 tubo orotraqueal tamanho 2,0

01 tubo orotraqueal tamanho 2,5

Título: Montagem de sala para Aula de Caso Clínico Pediátrico (Sim NewB)

Código:

1ª versão:
01/08/2023

Atualização:
Versão nº: 01

POP nº: 03

Página 3 **de** 3

Aprovador da unidade: Maria do Carmo Barros de Melo

Responsável Técnico: Cecília de Oliveira Carvalho Faria e Arcanja Dalva Caldeira Santana

01 tubo orotraqueal tamanho 3,0

01 tubo orotraqueal tamanho 3,5

02 Unidades Ventilatórias neonatal completa

Descrição do procedimento:

1. Higienizar as mãos
2. Higienizar o material antes da montagem da sala se necessário.
3. Colocar todo material no carrinho de transporte.
4. Distribuir os materiais nas mesas da sala
5. Ligar o manequim SimNewB
6. Ao término das aulas desligar o manequim
7. Verificar necessidade de higienizar o material.
8. Verificar a agenda para saber se será necessário recolher o material. Se for necessário recolher, colocá-los no almoxarifado.
9. Desligar as luzes e manter o ar condicionado em 22°C.

FIM

Em caso de não conformidade: Comunicar ao enfermeiro do turno quando o procedimento não for realizado para nova programação.

Referências:

Brasil. Decreto n.94.406/87. Regulamenta a lei n. 7498/86, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências. Brasília; 1987. Disponível em: <http://www.portalconfen.com.br>.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Lei n. 7.498**, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Disponível em: <http://www.portalcofen.com.br>. Acessado em: 23/07/2019.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN 564/2017 Código de ética dos profissionais de enfermagem. Disponível em: http://www.confen.gov.br/resolucao-confen-no-5642017_59145.html.